



IFUAG GbR

Nordstraße 2
D – 26135 Oldenburg

Telefon +49 (0) 441 25325
Fax +49 (0) 441 14485
Email info@ifuag.de
Web www.ifuag.de

dgab
Fachabstammungsgutachterin
geprüft durch die Kfzo
prakt. 1007013 www.kfzo.de



Akkreditiert nach DIN EN ISO 17025

Manuela Braunschweiger

Diplom-Biologin
Fachabstammungsgutachterin DGAB

Dr. med. Susanne Hirtz

Fachärztin für Rechtsmedizin
Fachabstammungsgutachterin DGAB

Anleitung zur Gewinnung von Mundschleimhautabstrichen

Bitte beachten Sie, dass die Person, der eine Mundschleimhautprobe entnommen werden soll, zuvor (ca. 30 Minuten) keine Nahrung oder Getränke zu sich genommen hat. Anderenfalls sollte, so weit möglich, der Mund mit klarem Wasser ausgespült werden.

- 1. Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit Einmalhandschuhe für die Probenabnahme und vermeiden Sie auf jeden Fall die Berührung der Tupferspitze.**
- 2. Bitte kennzeichnen Sie die Röhrchen mit den beigefügten Namensetiketten.**
- 3. Bitte entnehmen Sie pro Person nacheinander 3 Abstriche. Reiben Sie jeden Abstrichtupfer für mind. 30 Sekunden – mind. sechs Mal – mit kräftigem Druck an der Wangeninnenseite entlang.**
- 4. Bitte geben Sie die Abstriche in die Transportröhrchen zurück und lassen Sie diese vor dem Verschließen für ca. 30 Min. zur Trocknung offen stehen.**
- 5. Bitte geben Sie die Sendung möglichst umgehend zur Post.**

Sollten noch Fragen offen sein, rufen Sie uns an.